


Лампа ксеноновая МАJ-1817
для эндоскопических источников света моделей
CLV-190, CLV-S400, CLV-S200, CLV-290 и др.

Паспорт
УСНВ.676142.022 ПС

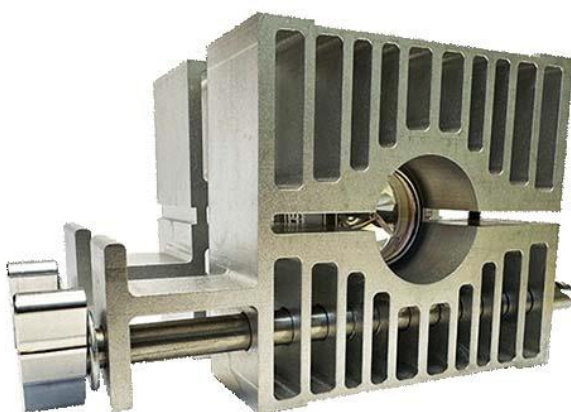

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Нью Стрим Дистрибьюшен"

_____Петров В.В.

1. Основные сведения об изделии и технические данные

Лампа ксеноновая MAJ-1817 — мощный ксеноновый источник света с металлическим радиатором в комплекте (далее “ламповый модуль”, “изделие”), который применяется в эндоскопических осветителях моделей CLV-190, CLV-S400, CLV-S200, CLV-290 и др. и устанавливается в их внутреннюю часть.

Производитель: ООО “Нью Стрим Дистрибьюшен”

Артикул: MAJ-1817

Код продукта (модель): XE-R12341

Страна происхождения: Российская Федерация

Параметры	Значение
Тип лампы	Ксеноновая
Наличие встроенного радиатора охлаждения	да
Мощность номинальная	300 Вт
Напряжение	13-14 В
Цветовая температура	5900-6100 К
Ток	18-22 А
Срок службы лампы номинальный	500 ч

2. Комплектность

- Лампа ксеноновая в комплекте с радиатором охлаждения – 1 шт.;
- Картонная упаковка с ложементами – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. Документы о соответствии:

Изготовитель декларирует соответствие изделия требованиям регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011. Номер декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза):
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.39185/26 от 06.03.2026.

Изделия являются принадлежностями к медицинским изделиям (согласно терминологии ГОСТ 31508-2012) и не подлежат регистрации в Росздравнадзоре в качестве медицинских изделий.

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 27.40.15-002-32965489-2024.

4. Указания по эксплуатации (применению)

Перед установкой лампового модуля в осветитель ознакомьтесь с инструкцией по установке от производителя осветителя.

Используйте данный ламповый модуль только с теми видеоэндоскопическими системами, которые предназначены для использования ламповых модулей указанного артикула.

На стекле лампы не должно быть отпечатков пальцев, термопасты и т.д. В случае загрязнений протрите стекло чистой тканью без ворса и, при необходимости, спиртом.

При обращении с лампами следует использовать надлежащие средства защиты глаз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещаются любые ударные нагрузки, приложения силы к колбе ксеноновой лампы, которая всегда находится под высоким давлением. Она может взорваться в случае удара или повреждения.

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления как в горячем, так и в холодном состоянии лампы могут использоваться только в соответствующих закрытых корпусах. Они могут использоваться в открытых светильниках только при условии обеспечения соответствующих мер безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается прикасаться к лампе в процессе использования или сразу после отключения лампы из-за риска получения ожога, в следствие высоких рабочих температур.

Лампы должны работать в установленных диапазонах тока и напряжения. Превышение может привести к износу лампы ранее положенного срока. Отклонение от номинального тока или напряжения может привести к

возникновению неустойчивостей и проблем (в зависимости от источника питания).

Следует соблюдать осторожность при использовании фильтров или линз, которые могут отражать излучение обратно внутрь лампы.

Использованные лампы должны храниться в безопасном месте в коробках, в которых они были поставлены, или под защитной крышкой до тех пор, пока они не будут отправлены на утилизацию.

5. Транспортирование, хранение, срок службы и гарантии изготовителя

Условия транспортирования ламповых модулей в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе Л ГОСТ 23216.

После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковыванием, ламповый модуль должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 24 часов в транспортной таре.

Условия хранения ламповых модулей должны соответствовать группе условий хранения УХЛ, категория размещения - 4 ГОСТ 15150

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ламповых модулей требованиям ТУ 27.40.15-002-32965489-2024 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных данным паспортом и руководством по эксплуатации.

На товар распространяются все гарантии производителя.

6. Свидетельство об упаковывании и приемке

Лампа ксеноновая МАJ-1817 № _____
Наименование изделия Заводской номер

Упакован в ООО «Нью Стрим Дистрибьюшен» согласно требованиям, предусмотренными в технических условиях 27.40.15-002-32965489-2024. Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,

техническими условиями 27.40.15-002-32965489-2024, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Год, месяц, число

7. Сведения об утилизации

Перед утилизацией ксеноновой лампы удалите газ из стеклянной колбы. Для этого наденьте защитные очки и перчатки. Крепко обхватите лампу рукой и отрежьте или открутите плоскогубцами небольшой патрубок на заднем торце лампы. При этом будет слышно, как выходит газ. Далее утилизируйте согласно всем государственным и местным законам и нормативам.

8. Контакты производителя:

ООО «Нью Стрим Дистрибьюшен»

143969, Московская обл., Реутов, ул. Октября 18, пом. 004.

www.xenarium.ru

тел.: +7 (495) 54-54-834